



WAM'X
ワムX

金属コア除去キット



動画はこちらで
ご確認ください

患者に優しい

支台歯への負担が少なく心地よい処置を提供できます

早くて使いやすい

シンプルなインストゥルメントで準備から処置まで
*短時間でいきます (目安として5~10分程度)
* 治療内容による

フレキシブル

使いやすいユニークなデザインで臼歯部を含むほとんどのケースの金属コアを除去できます

3
STEP

STEP 1



ブロングを挿入できるように
金属コアを切削します

STEP 2



金属コアにブロングを挿入し
フォーセップスを開いて除去します

STEP 3



特徴

ブロングがフレキシブルに動くため抵抗の低い角度で除去します



3 種類のブロング (S, M, L) によりほとんどのケースに対応できます



衝撃吸収ネジがフォーセップスの広がりを制限することで除去中、除去後の衝撃を緩和します




ブロングを挿入するスペース作成後の写真
歯根の方向を考え、切れ込みの高さを変えてある



ワムXを挿入した写真



セメント層が破壊されコアが浮き上がっている写真
グリップを握る力は弱い力で十分である

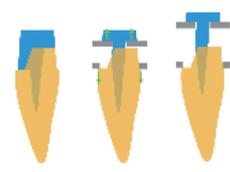

スーパークイック法によるコア除去の模式図
両側のマージンにブロングを引っ掛けて力を加えることにより、コアの形状によらず幅広い症例に対応できる



ブロングを挿入できるよう、コアを切削した後の写真



ワムXを挿入した写真
下部のブロングをマージンに引っ掛け、上部のブロングは切り込みに挿入している



コアが除去された瞬間の写真

私自身ワム X を使用しコア除去を行う場合、残根に鑄造コアを築造している症例以外は、ほぼスーパークイック法で行っています。近心の歯質は歯肉縁上約1mm、遠心の歯質は歯肉縁下 0.5mm 程度でした。また コア部分が短く、近心に2枚のブロングを挿入するだけのスペースを作り出すには、近心の歯質の切削を避けられないため、スーパークイック法を選択しました。当初はブロングのサイズとメタルコアの切削量の感覚がつかめず慣れを要しましたが、ブロングが適合すると軽くグリップを握るだけで驚くほど簡単に除去でき、特に全切削が免れないと思われた鑄造コアが、パカッと取れるのは感動を覚えるほどでした。コアの除去に要する時間も概ね7分程度とストレスのない時間で除去が可能で、またスーパークイック法を応用すれば従来の除去用鉗子では対応が難しいようなケースでも楽に除去することができました。


記事提供 少路かねこ歯科医院 (大阪府豊中市) 院長 金子 龍太

ユニバーサル法対応基本キット

商品名 ワムX 金属コア除去イントロキット

キット内容

- フォーセップス (衝撃吸収ネジ付)
- ブロング 計6個
(ブロングS×2 / ブロングM×2 / ブロングL×2)
- シリコンリング 3サイズ
(S×2 / M×2 / L×2) 計6個

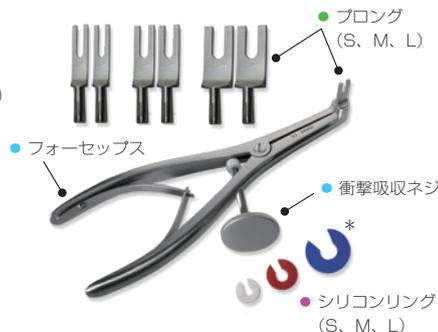

*シリコンリングは切れていませんので
スーチャーシザーズなどで切ってから
使用してください

商品名 ● シリコンリング 3 サイズ

S×2、M×2、L×2 計6個



オートクレーブ対応 (134℃) 販売名: ワムX 金属コア除去イントロキット 医療機器届出番号: 13B1X00133000069

スーパークイック法ブロング

商品名 ● スーパークイック ブロング **SQ**

XS、S、M、L、XL 1個



商品名 ● スーパークイックブロングアソート

XS×1、S×1、M×1、L×1、XL×1 計5個

ユニバーサル法ブロング

商品名 ● ブロング

S、M、L 1個



価格はこちらから