

DENTAL WORLD

cf CrossField

クロスフィールド商品情報誌
デンタルワールド

44

on Web



- ・ 繊細な歯周外科手術のための
エステティックナイフ
- ・ **新商品！組み立てブロック“テグミー”**
- ・ 口腔内の優れものエルゴフィンガー
- ・ 歯科衛生士の推し！PMTCペースト
- ・ TePeの歯間クリーニンググッズ2選

【目次】

外科用器具

繊細な歯周外科手術のためのストレスフリーな操作性

KAI エステティックナイフ

歯周病治療専門クリニックSPIDO（大阪府大阪市）
院長 辻翔太

インテリア
雑貨

待合室から知育を発信

程よい制約の中から創造性を育む

組み立てブロック「テグミー」

株式会社エドギフト（千葉県柏市）
代表取締役 村松 美穂

診療補助

口腔内の優れものエルゴフィンガー

高田歯科 合同会社 132PRODUCTS 代表（兵庫県神戸市）
歯科衛生士 高橋 規子

患者さんの笑顔を引き出せるPMTCペースト

「プロフィーペーストPro HAp」

山本歯科（大阪府豊中市）
松岡歯科・小児矯正歯科（大阪府吹田市）
症例相談スタディグループLASC 代表
歯科衛生士 山口 珠美

発売当初から使い続けている

プロフィーペーストPro HApの特徴

医療法人社団巧智会 おのざわ歯科クリニック（東京都板橋区）
歯科衛生士 野渡 香央留

プロフィーペーストPro HApを使用してみた

新鎌ヶ谷歯科(千葉県鎌ヶ谷市)
歯科衛生士 武田 由季奈

毎日のセルフケアに歯間クリーニングを！

さっぽろプロケア歯科クリニック（北海道札幌市）
歯科衛生士 山崎 留茄

歯科衛生士と患者さんを繋ぐTePeデンタルフロス

麻生デンタルクリニック（北海道札幌市）
歯科衛生士 岩崎 美保

予防歯科

繊細な歯周外科手術のためのストレスフリーな操作性 KAI エステティックナイフ

歯周病治療専門クリニックSPIDO
(大阪府大阪市)
院長 辻 翔太



マイクロナイフKAIエステティックナイフは、歯周外科用のマイクロメス刃です。ハンドル一体型で、最大の特徴は刃先を自在に曲げることができる点です。マイクロメスは、刃先を曲げない状態で用いると、歯間部や歯肉溝切開時の操作性に難があります。(画像1)しかし、このメスは刃先の角度を変えることで、狭い部位でもハンドルが対合歯に干渉することなく、スムーズな切開を行うことができます。(画像2)



画像1
ブレードがまっすぐな状態では、矯正装置や補綴物、対合歯により適切なアクセスができない




画像2
KAI エステティックナイフは、症例に応じて自由自在に角度を変えることができる

特に拡大鏡や顕微鏡下で行う、繊細な歯周外科手術を行う際には、正確かつ繊細な操作が求められるため、非常に有用です。(画像3,4)私自身も、このナイフを使用するまで、無理やり曲げて、折ってしまったことが何度もありました。

このナイフによって、特に審美領域の繊細な歯周外科治療時に、ストレスフリーで治療を行うことができる上、歯周病治療の新たなスタンダードとなることが期待されます。



画像3
KAI エステティックナイフを用いて歯肉溝切開を適切に行うことで、低侵襲な抜歯が可能である

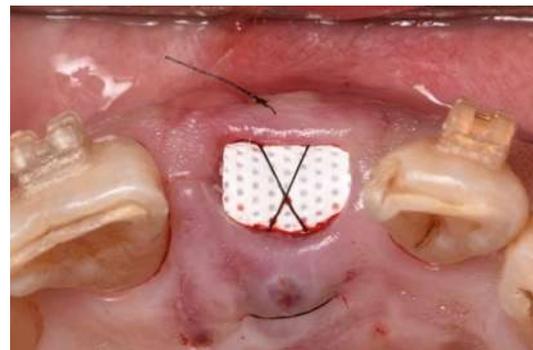

画像4
抜歯による周囲組織の損傷を最小限にすることで、適切な歯槽堤温存術を行うことができた

待合室から知育を発信 程よい制約の中から創造性を育む 組み立てブロック「テグミー」



株式会社エドギフト
(千葉県柏市)
代表取締役 **村松 美穂**

テグミーは6種類のみパーツを使って無限の作品を作り上げることができるブロックですが、開発当初は50種類ほどパーツの形がありました。

はじめは、「パーツの種類が多いほど子どもたちの創造の幅が広がる」と考え、花や星、特殊な形を持つパーツなど、さまざまなデザインを用意しました。しかし、子どもたちに遊んでもらった結果、驚きの発見がありました。**パーツが多すぎると、大人が意図した使い方に頼る傾向が強まり、子どもたち自身が考え試行錯誤をする時間が減ってしまったのです。**

そこで、私たちは原点に立ち返りました。「**子どもたちが自分の力で考え、手を動かしながら創造力を存分に発揮できるおもちゃにしたい**」という想いのもと、すべてのパーツを一つひとつ見直しました。その結果、役割が重複するものや特別な機能を持たないものを徹底的に削ぎ落とし、最終的に選ばれたのが現在の6種類のパーツです。**これらのパーツこそ、子どもたちの創造力を引き出す「本質的な形」だと私たちは確信しています。**





実際にご利用いただいた方々からは、「子どもの試行錯誤を引き出せるように形が考え抜かれている」「組み立てからごっこ遊びまで幅広い遊び方ができるので、長く愛用できる」など、嬉しいお声をたくさんいただいています。


テグミーは、ただのブロックではありません。子どもたちの無限の可能性を引き出す「創造のパートナー」として、これからもたくさんの笑顔と驚きを届けてまいります。

口腔内の優れものエルゴフィンガー



高田歯科
合同会社132PRODUCTS 代表
(兵庫県神戸市)
歯科衛生士 **高橋 規子**

エルゴフィンガーは、その名前の通りエルゴノミック（人間工学）に基づいたデザインで、術者の体への負担を軽減するバキュームです。その特徴として一番に挙げられるのは、**バキューム自体を手でにぎるのではなく、人差し指や中指先に装着して操作すること**です。指先で粘膜や舌を排除しているようなイメージで使用することができるため処置中のバキューム操作に慣れていない方でも使いやすいでしょう。

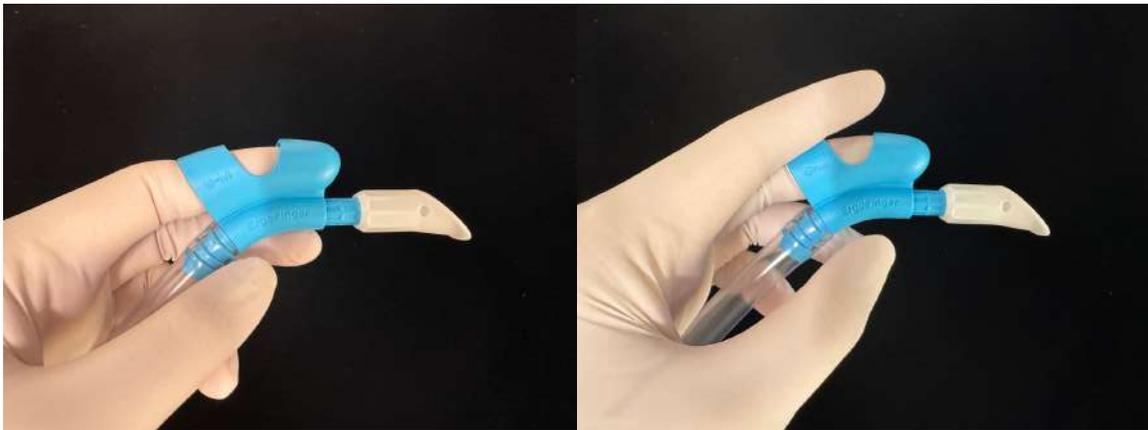

また、**粘膜排除の力のかけ具合がダイレクトに指先に伝わるため、優しく視野を確保することが可能です**。さらに、バキューム操作時に、腕や肩が上がることなく、臨床での疲れが軽減したように感じます。



エルゴフィンガーは、従来型のバキュームとは持ち方が違うため、部位に合わせてノズルの長さを調整する必要があります。



左側や前歯部などバキュームをもつ左手から近い部位ではノズルは短く、また右側はノズルを長くすることで、患歯にバキュームチップを近づけることが可能です。ノズル部分はプラスチック製で、ラバーのように引っかかることがないため、片手で角度や長さの調整ができるのが特徴です。また、ストッパーが装着されており、カチカチと音を立てながら、止めたい位置で正確に固定できます。



一度の診療でフルマウス処置を行う歯科衛生士は、部位が変わるごとにバキュームチップの向きを何度も変える必要があります。エルゴフィンガーは、チップの微調整が行えるため、処置時間の短縮につながりストレスが軽減されます。



患者さんの笑顔を引き出せるPMTCペースト 「プロフィーペーストPro HAp」

山本歯科（大阪府豊中市）
松岡歯科・小児矯正歯科（大阪府吹田市）
症例相談スタディグループLASC 代表
歯科衛生士 **山口 珠美**



私たちが日々行う臨床の中で大切にしている施術の一つにPMTCがあります。口腔内を観察し、リスク因子を考えながら、この患者さんにはどのペーストを使用したらどんな効果を得ることができるのか、日々試行錯誤されている方もいらっしゃるかと思います。

皆様は、どのような観点からPMTCペーストを選んでいますか？中にはチェアタイムの短縮を図るためにワンステップタイプのPMTCペーストを希望される方も多いと思います。そこで今私が気に入っているワンステップタイプのPMTCペースト「**プロフィーペーストPro HAp**」をご紹介します。

このペーストは、**ナノ粒子ハイドロキシアパタイト**により歯面が滑沢化するため、PMTC後、患者さんに舌で口腔内を触って確認していただくと、「**つるつるになった！**」「**気持ちがいい！**」「**味がいい！**」と実感していただけます。患者さんが笑顔になるこの瞬間はいつも歯科衛生士としてとても嬉しい気持ちになります。



写真1
クリーニング プロフィーペーストPro HApを使用

そのほかにも**歯肉退縮**や**根面露出**している患者さんに積極的に使用しています。また薄いステインの付着であれば

カップのみで除去でき、歯面もツルツルとなめらかになります。

このようにプロフィーペーストPro HApは**歯科衛生士と患者さんの信頼関係構築に役立つアイテム**だと思います。



写真2
メンテナンス後
プロフィーペーストPro HApを使用
*プラークコントロールがいつも良好で
維持管理されている患者さんの口腔内

発売当初から使い続けている プロフィーペーストPro HAp(ハップ)の特徴

医療法人社団 巧智会
おのざわ歯科クリニック
(東京都板橋区)

歯科衛生士 **野渡 香央留**



プロフィーペーストPro HApの使用感を紹介させていただきます。

【特徴】

- ・ハイドロキシアパタイト含有
- ・この1本で軽めのステインを落としつつツヤ出しまで可能
- ・マイルドなミント味（あまり味がしない為か、小児や味覚過敏の方にも使用できる）
- ・根面にもアプローチ可能



プロフィーペーストPro HApを使用して歯面研磨中の写真

ワンペーストですがきれいにステインを落とし歯面にツヤがでるので、患者さんも術者も満足度が高く、ケアタイムの時短にもなり優秀な研磨剤です。

当院では障がい者歯科治療も行っています。

ご家族の皆さまは口腔ケアへの意識が高く、定期検診の受診率も高いです。写真の方のように開口器を入れ、抑制下でケアを行う方も少なくありません。

ホームケアが十分にできない方の口腔内は、プラークやステイン等の汚れはもちろん、根面露出や歯面の脱灰など問題が多いです。また、味覚過敏の方も多く、歯磨剤や研磨剤の味や発泡でパニックになってしまう方もいらっしゃいます。この**プロフィーペーストPro HAp**は**味もマイルドで発泡も少ない**ためか、この様な方にも適していると感じています。



スペシャルニーズの患者さんのクリーニングの様子

時短ができる・綺麗な仕上がり・歯質の強化・根面などのデリケートな部位OK・味覚問題もクリア。

ハイドロキシアパタイトを高濃度で含有している研磨剤なのでちょっとお値段は高いのですが、[上記の説明を患者さんやご家族にしっかり行くと](#)、“特別なペーストで仕上げてもらえた”喜んで頂いています。



プロフィーペーストPro HA pを使用してみても



新鎌ヶ谷歯科（千葉県鎌ヶ谷市）

歯科衛生士 **武田 由季奈**

プロフィーペーストPro HA pが当院に導入される前はメンテナンス時のPMTCに使用するペーストは段階を踏んで数種類使うことが多くありました。プロフィーペーストPro HA p導入後はワンステップで汚れの除去や艶出しまで行うことができ、患者様にも術者側にも負担が少なく、さらにチェアタイムの減少につながることでスムーズなメンテナンスが可能になりました。

私がプロフィーペーストPro HA pを使用する際には患者様にパッケージをお見せしながら「本日の仕上げに予防歯科の先進国であるスウェーデン製のこちらのペーストを使用していきますね。」とプロフィーペーストPro HA pを使用する目的や働きを説明することが多いのですが、スタイリッシュかつ清潔感のあるデザインなので患者様も興味を持ってくださり、仕上がりの満足度も高いようです。患者様が「ツルツルになったし、とても気持ち良かった。」とおっしゃってくださることで歯科衛生士側のモチベーションも上がり日々の業務の質もあがりました。



目次

毎日のセルフケアに 歯間クリーニングを！

さっぽろプロケア歯科クリニック
(北海道札幌市)

歯科衛生士 **山崎 留茄**



患者さんにセルフケアの指導をしていると「**歯と歯の間って気にしてなかった**」「**歯ブラシ以外は使ったことない**」という声を結構耳にします。私たち歯科医療従事者からすると驚きなのですが、もしかするとあまり歯間クリーニングは浸透していないのかもしれない。

私は歯面のプラークコントロールができるようになったら次のステップに歯間ブラシやフロスでの歯間クリーニングを指導しています。


そこで当医院が患者さんにおすすめしているのが、「**TePe アングル歯間ブラシ**」です。患者さんの口腔内に合わせてサイズ選択ができるので、患者さんからは「市販で適当に買うよりも自分に合ったものを選んでもらえるの嬉しい！」と歯科衛生士からの処方に満足の声もたくさんあります。

また、TePeのアングル歯間ブラシは名前の通りL字に曲がっているので**臼歯部にも挿入しやすく、歯間ブラシを使ったことのない患者さんにもご好評**いただいています。

歯間部はもちろんBrのポンティック部や、最後臼歯遠心などに使ってもらうことが多いです。また、ブラケット矯正中の患者さんにはブラケット周りへの使用も勧めています。

当医院では物販コーナーを待合室に設け、そこにTePe歯間ブラシコーナーも作っています。見た目もカラフルなTePeの商品は患者さんからの人気も高いです。

歯ブラシに加えてのセルフケアに使ってほしい歯間ブラシです。

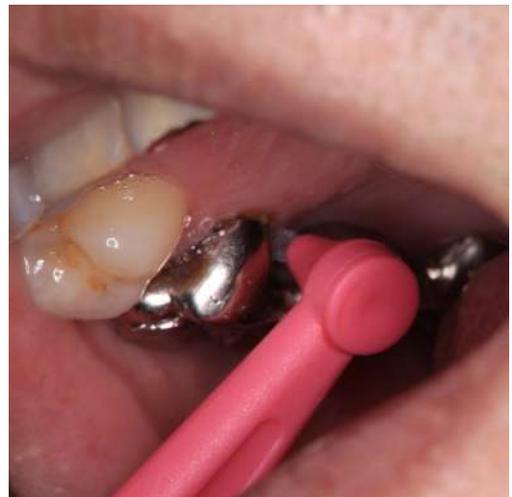

アングルタイプは口蓋側からも挿入しやすい



待合室の物販コーナー

手書きポップで患者さんからも好評いただいています

Dental World Vol.44|10

歯科衛生士と患者さんを繋ぐ TePeデンタルフロス



麻生デンタルクリニック
(北海道札幌市)
歯科衛生士 **岩崎 美保**

私は臨床で健康な歯肉、または軽度の歯肉炎がある患者さんには、ブラッシングと併用して**TePeデンタルフロス**の使用を勧めています。

説明の際は、**384本のフィラメントの束をほぐして視覚に訴えます**。未だかつてないほどのインパクトにより、患者さんから驚きや、笑顔、質問などのリアクションが返ってくる事が多く、興味を持ってくださることを実感できます。



院内POP
植物性ワックスとアボカドオイルで
コーティングしていることに
興味を持つ患者さんも多いです

フロスはテクニック指導に偏りがちですが、コル付近は脆弱な非角化歯肉が存在しているため、**力いっぱい挿入させてしまうと、歯肉を傷つけ痛みを伴うこと、正しい使い方で歯間部や歯間乳頭付近のクリーニングを行うことは、歯肉炎のリスク軽減に繋がること**について説明します。



染め出し後、デンタルフロスを前後にスライドさせながら引き上げるとプラークが除去出来ているのがわかります

また、ご自身での歯間クリーニングの摩擦によって膨らんだTePeデンタルフロスを鏡で見えていただき、さらにTePeデンタルフロスを歯面に押し付けて平らにすることで表面積を増やし、歯肉溝や隣接面を効率的にクリーニングできることを説明すると、さらにフロスの重要性を理解していただくことができます。そこから炎症のメカニズムの説明などに発展させることもできます。

TePeデンタルフロスには様々な特徴があるので、患者さんに興味を持っていただくことができ、**歯科衛生士と患者さんを繋ぐコミュニケーションツール**としても大いに役立っています。



コミュニケーションツールにもなり
テクニック指導もスムーズです



目次